




## **WISEIRA DE PROTEÇÃO**

**Protection visor | Visera de protección |  
Visière de protection**



**Viseira de Proteção**

## Uso e Manutenção

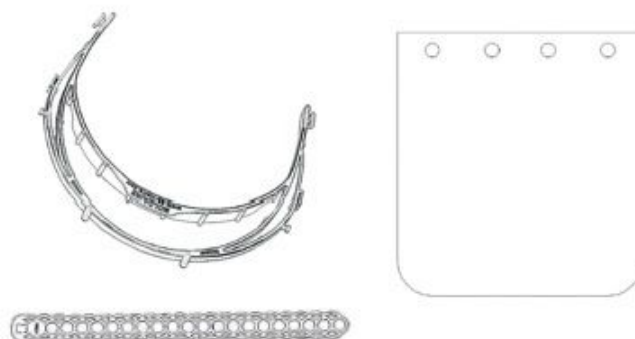

### Características:

Peso - 35grs

Dimensões Viseira - 210x297 mm


Dimensões Armação - 200x170mm

Material Viseira - Acetato - 0,2mm

Material Armação - PP

Banda Elástica - TPE

- 1 - Coloque a viseira com a posição do elástico;
  - 2 - Verifique se está apertado ou demasiado largo;
  - 3 - Ajuste a banda elástica na posição (furo) que mais lhe for confortável;
  - 4 - Mantenha a viseira transparente, limpa de qualquer marca de toque ou sujidade.
- Lave com um pano embebido em álcool, e seque com um pano seco;
- 5 - Faça o mesmo à banda elástica após um dia de utilização;
  - 6 - Se houver necessidade troque a viseira frontal de acordo com o manual abaixo, recorrendo a uma folha de película formato A4 (tipo acetato).

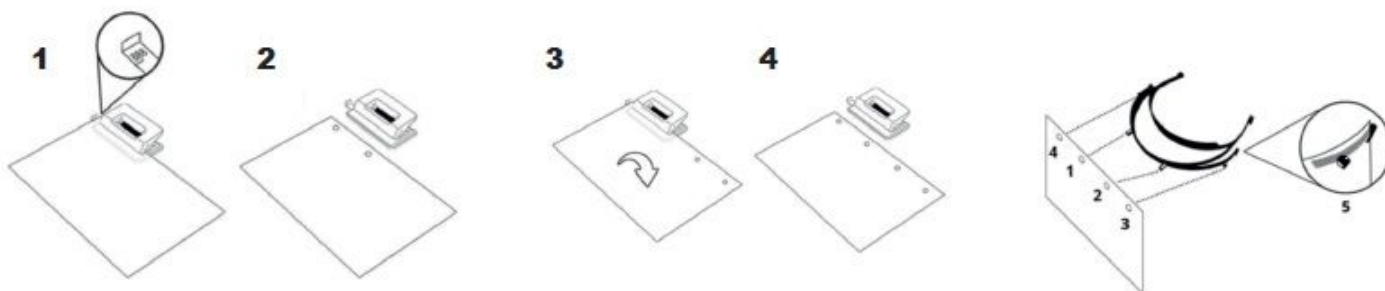

Fabricado em Portugal

	S/IVA	C/IVA
WISEIRA + ACETATO (0,2mm)	3,75 €	4,61 €
WISEIRA + ACETATO USO INTENSIVO (0,7mm)	4,50 €	5,54 €
ACETATO EXTRA (0,2mm)	0,25 €	0,31 €
ACETATO EXTRA USO INTENSIVO (0,7mm)	1,00 €	1,23 €



[www.feralexgloves.pt](http://www.feralexgloves.pt)  
[feralex@feralexgloves.mail.pt](mailto:feralex@feralexgloves.mail.pt)

Rua dos Sabugueiros, nº 36 | Sabugo | 2715-396 Almargem do Bispo | Portugal  
tel +351 219 623 203 | fax +351 219 626 034 | gsm +351 935 566 553